

Röststyrt HLR-kort

HLR-KORTET I FICKFORMAT aktiveras när du öppnar det och instruerar dig till livräddande Hjärt-Lungräddning (HLR).

Baserad på enkel "spelande-gratulationskorts-teknik" ger detta kort röststyrda instruktioner till användaren att ta bort den gröna skyddsplasten och att placera kortet på personens bröstorg enl markeringar på kortet. Därefter ges instruktioner för hur man utför HLR; bröstkompressioner och inblåsningar. Illustrationerna och textinstruktionerna på kortet ger ytterligare hjälp vid HLR.



Röststyrt HLR-kort
Liten, smidig och lätt.
Får enkelt plats i fickor eller
Första-hjälpen-etuier m.m.



Illustration som visar var på
bröstkorgen kortet ska placeras
innan bröstkompressioner ges. En
ljudmetronom hjälper till att hålla
taktan på bröstkompressionerna.

Drag i fliken för att aktivera kortet. Följ
röstinstruktionerna för att ge HLR.



Det gröna skyddet dras av och
kortet placeras på bröstkorgen.
Använd ansiktsskyddet då du ska
inblåsningar.

Tydliga instruktioner som hjälper
vid HLR.




1

Om personen
är medvetslös,
ring 112.

2

Öppna **HLR-kortet** och dra ut
fliken så att kortet aktiveras.
Följ instruktionerna och placera
kortet på personens bröstorg.

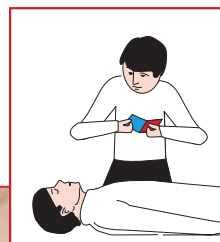

Tack vare klistret på kortet och den tydliga illustrationen är
det enkelt att placera kortet rätt på bröstkorgen.



3

När du får tillgång till
hjärtstartare, starta den
och följ instruktionerna
för användning.